



FORA 福爾 G10

易退片血糖機

簡易使用說明書

福爾係經美商 Foracare Inc. 監製，並授權商標使用與販售。
製造廠名稱：泰博科技股份有限公司五股廠
製造廠地址：台北縣五股鄉五工二路127號3樓、5樓
藥商名稱：泰博科技股份有限公司
藥商地址：台北縣五股鄉五工二路127號6樓
福爾台灣網址：www.foracare.com.tw
客戶服務專線：0809-007-868 [週一~週五 9:00-18:00]

本產品僅供自我測試體外診斷。





315-4231500-003

其它時間，請聯繫您的醫療保健專業人士的援助。

親愛的福爾易退片血糖機使用者您好：

感謝您選用福爾易退片血糖機。本產品提供您測量血糖；準確的測試結果，讓您可以放心的和醫師一同監控血糖值的變化。本產品操作簡便，適用於居家健康管理。
在您使用福爾易退片血糖機，簡易使用說明書能輔助您快速了解福爾易退片血糖機的操作方式；若您想知道關於此機器更進一步詳細資訊，敬請詳細閱讀使用說明操作手冊。

產品介紹

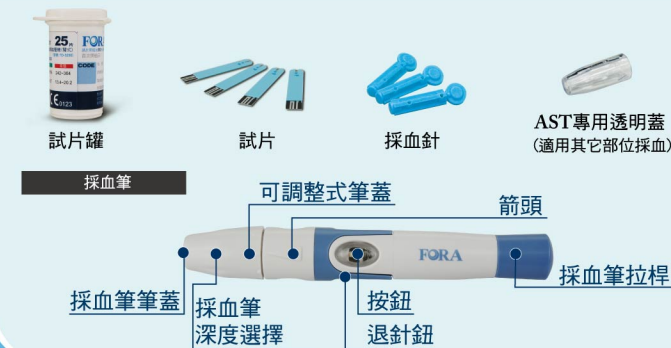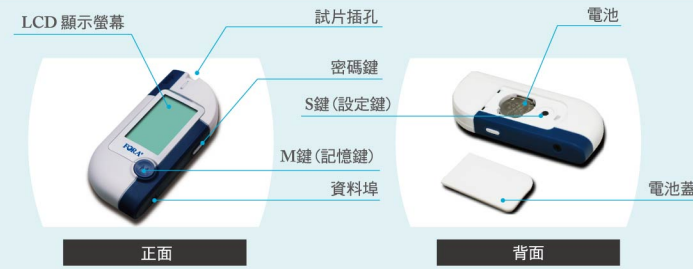

1. 機器設定

1-1




進入設定模式：
按設定鍵即進入設定模式。
年份首先閃爍

1-2



按M鍵改變參數調整數字直到正確。
按設定鍵進入下一個調整之選項。

1-3

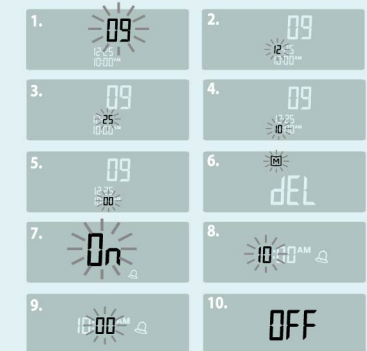

依前面1-2步驟來執行，畫面依次會出現：
1. 年份
2. 月份
3. 日期
4. 小時
5. 分鐘
6. 記憶刪除功能
7.~9. 自動開鈴設定 (on為開啟；Off為關閉)
10. 機器自動關機
當您完成設定，按一下設定鍵，機器自動關機。

2. 密碼設定

2-1



於關機狀態下，長按密碼鍵開始。首先顯示Code與SEL，然後閃爍的密碼。

2-2



當號碼閃爍時，按密碼鍵選擇與試片罐上相同所要的號碼。

2-3



按記憶鍵固定號碼，設定完畢後，自動關機。

簡易使用說明書

3. 採血設備

3-1




取下採血筆蓋。

3-2



請用大拇指輕抬住「採血針置入處」凹槽部位，再將採血針『完全套入到底』，確定緊固。

3-3

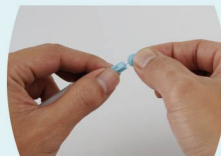

旋轉取下採血針針頭護蓋。

3-4



將採血筆蓋套回並固定。

3-5



* 選擇採血深度。
* 刻度線條越長，扎入深度越深。
詳細內容請見福爾易退片血糖機使用說明書。

3-6



雙手握住筆身及筆桿往後拉，使產生喀一聲。此時，按鈕的顏色會發生變化，代表設定完成。

4. 血糖量測

試片開封，請先於瓶身記下首次開瓶日期。開封後於90天內使用完畢

4-1



取出試片前，請拭乾雙手；試片取出後，並立即蓋上試片罐蓋。

4-2



將試片插入機器。
螢幕依序顯示CH及 □ → Code 號碼與閃爍的“ ”。

4-3



確認試片瓶上號碼和機器上所顯示號碼相同。

4-4



輕輕按摩採血部位。以酒精棉片消毒後，待酒精揮發完全。將採血筆牢牢抵住要採血的位置；按下按鈕聽到喀聲時代表採血已經完成。

4. 血糖量測

4-5



輕輕地擠壓穿刺的周邊部位以獲得足夠的血液。

4-6



機器上的“ ”閃爍時，將手指上的血液以45度靠近試片吸入口，血液會被吸入，停留約2秒後，待吸入口的反應區內吸滿血後，再移開。

4-7



機器開始倒數到0完成後，結果會出現於螢幕，所得數值會自動被記憶。

4-8



取出試片，機器會自動關機。

4-9



採血針處理
• 拔下採血筆蓋。
• 將針頭刺入採血針針頭護蓋。
• 一手往前推動退針鈕，一手輕拉後端拉桿，退出採血針。

請注意

- 採血針請勿重複使用或與他人共用，避免交互感染。
- 請依當地法令規定丟棄使用過的試片和採血針。

5. 訊息解讀

量測結果輔助指示

隨量測結果出現的「輔助指示標誌」僅用於提示作用，其所代表的血糖範圍如下。相關正確的血糖控制範圍，請依照醫護人員的指示。

Lo	Low	Normal
血糖值低於量測範圍 20mg/dL時出現請立即尋求醫護人員協助	血糖值偏低 血糖值介於20-69mg/dL時出現。	血糖值正常 血糖值落於參考範圍 70-119mg/dL內時出現。
High	High KETONE?	Hi
血糖值偏高 血糖≥120 mg/dL時出現。	血糖值過高 血糖≥240mg/dL時出現。主要是提醒第一型糖尿病患者其血糖值過高，可能會導致酮體產生而有酸中毒的危險。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。	血糖值高於量測範圍 600mg/dL時出現。 請立即尋求醫護人員協助。

依據2008年美國糖尿病協會建議，糖尿病病人及正常人應盡量將血糖控制在標準血糖值範圍，如下表所示：

時段狀態	血糖值範圍	
	正常人血糖值 ^{*1}	糖尿病控制目標值 ^{*2}
空腹或餐前	<100 mg/dL	70-130 mg/dL
飯後2小時	<140 mg/dL	<180 mg/dL

資料來源：

*1 American Diabetes Association (2008). Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care, 31 (Supplement 1): S1 -108
*2 American Diabetes Association (2008). Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, 31 (Supplement 1): S12-S54.

簡易使用說明書